

Denu Paste használati útmutató

(Kalcium-hidroxid paszta bárium-szulfáttal)

Indikáció: A DENU PASTE egy kalcium-hidroxid alapú endodonciai paszta, amelyet fogászati kezelésekhez terveztek. Ideiglenes gyökércsatorna-tömésre és a csont gyógyulás elősegítésére használják.

1. Ideiglenes gyökércsatorna-tömés:

A gyökércsatorna ideiglenes lezárására endodonciai beavatkozások során, az újrafertőzés megelőzésére és a gyógyulás elősegítésére.

2. Pulpasapka és mély üregbélelés:

Mély szuvas elváltozások esetén alkalmazható indirekt vagy direkt pulpasapkaként a pulpa védelme és a remineralizáció elősegítése érdekében.

Jellemzők:

- Kalcium-hidroxid alapú, elősegíti a keményszövetek képződését és kiváló biokompatibilitást biztosít.
- Magas lúgos pH (~12,5)
- Erős antibakteriális hatást fejt ki a baktériumok elpusztítására a gyökércsatorna-rendszerben.
- Előre kevert paszta fecskendő formájában
- Használatra kész, könnyen felvihető közvetlenül a csatornába, minimális hulladékkal.
- Sugárfogó
- Könnyen látható röntgenfelvételeken a pontos elhelyezés és a műtét utáni értékelés érdekében.
- Vízben oldódó
- Könnyen eltávolítható a későbbi kezelések során.
- Nyugtatja a pulpaszövetet
- Elősegíti a gyógyulást és csökkenti a kezelés utáni kellemetlenségeket.

Használati utasítás:

1. Használat előtti előkészítés:

Használat előtt ellenőrizze a termék lejárat dátumát, idegen anyagok vagy szennyeződések jelenlétét és a romlás jeleit. Csak akkor használja, ha a termék megfelelő állapotban van.

Olvassa el és kövesse figyelmesen a gyártó használati utasítását.

Használat előtt győződjön meg arról, hogy a gyökércsatorna tágítása, formázása és fertőtlenítése megtörtént.

2. Működési eljárás:

Tisztítsa meg és szárítsa meg a betömendő gyökércsatornát.

Csatlakoztassa az adagolófejet a fecskendőhöz, és helyezze be a csatornába.

Finoman nyomja meg a fecskendő dugattyúját a paszta kiadagolásához.

A betöltött mennyiség a skála segítségével ellenőrizhető.

Ha a paszta túlcsondul a pulpakamrába, lassan húzza ki az adagolóhegyet a légbuborékok elkerülése érdekében, és fejezze be a tömést.

Távolítsa el a felesleges pasztát a csatorna területéről.

Használat után vegye le a használt adagolóhegyet, és zárja le a kupakot.

Figyelem:

1. Ezt a terméket csak engedéllyel rendelkező fogorvosok vagy fogászati szakemberek használhatják, és be kell tartani a megfelelő használati és biztonsági utasításokat.
2. A termék használata előtt olvassa el és értse meg teljes mértékben az összes használati utasítást.
3. Használat közben kerülje a bőrrel és a szemmel való érintkezést. Ha a paszta szembe kerül, azonnal öblítse ki bő folyó vízzel, és forduljon szemészhez.
4. Ne alkalmazza olyan betegeknél, akik gyulladás vagy allergiás reakciók jeleit mutatják a termékre.
5. Gyermekek és idősek elől elzárva tartandó.
6. Ne alkalmazzon túlzott nyomást a paszta kiadagolásakor, mivel ez kellemetlenséget vagy fájdalmat okozhat a betegnek.

7. Ne használja a terméket a lejáratí idő után.
8. Ez a termék nem szájon át történő bevételezre szánták.

Kontraindikációk:

Ne alkalmazza a DENU PASTE-t olyan betegeknel, akik túlérzékenyek vagy allergiás reakciókat mutatnak a kalcium-hidroxidra vagy a termék bármely összetevőjére.

Ne alkalmazza olyan aktív fertőzés esetén, amely szisztémás kezelést vagy sebészeti beavatkozást igényel.

Nem alkalmazható súlyos pulpa- vagy periapikális gyulladásban szenvedő betegeknel, akiknel alternatív kezelés javallt.

Nem szájon át történő bevételezre vagy a megadottól eltérő alkalmazásra szánták.

Tárolás:

1. Kerülje a közvetlen napfénynek való kitétséget.
2. A terméket fénytől védett tokban tárolja.
3. Használaton kívül fedje le a fecskendő hegyét kupakkal, és tárolja szobahőmérsékleten.
4. Használat előtt vagy után ne sterilizálja a terméket hővel.

Csomagolás:

1 x 2 g-os fecskendő, eldobható hegyekkel

Eltarthatóság:

A gyártástól számított 3 év (szobahőmérsékleten)