

DENU DAM

DENU Dam, folyékony kofferdám, ínyvédő, (2ml) + 2 kanül

Fényre kötő folyékony kofferdám fogfehérítéshez és egyéb kezelésekhez. Az íny védelmét hivatott szolgálni a fogfehérítési eljárás során. Folyékony halmazállapota könnyű használatot tesz lehetővé, mindössze rövid ideig (15 mp) kell megvilágítani és a kezelés végén könnyen eltávolítható.

Színe: kék

- Kevesebb hő a megvilágítás során.
- Megfelelően folyékony, könnyű használat.
- Mindössze 15 mp megvilágítást igényel.
- Könnyen eltávolítható.

Fényre kötő ínyvédő fogfehérítéshez. Fényre kötő műgyanta, mely fogfehérítés során az íny védelmét hivatott szolgálni. Megfelelő sűrűsége könnyű használatot tesz lehetővé, mindössze 15 mp megvilágításra van szükség és a kezelés végeztével könnyen eltávolítható. Kék színű.

Jellemzői:

- kevesebb hő a megvilágítás során
- megfelelő sűrűség, könnyű használat
- mindössze 15 mp megvilágítás
- könnyedén eltávolítható

Használata:

- vigye fel az ínyre a fogfehérítő kezelés megkezdése előtt

Ajánlott felhasználás:

- Tisztítsa és szárítsa meg az ínyt
- A DenuDam előkészítése:
- a védőkupak eltávolítása után helyezzen a fecskendő végére egy egyszer használatos kanült
- használat előtt győződjön meg róla, hogy a kanül nincs eldugulva
- ha eltömődött, vegye le a kanült, és nyomjon ki egy kis adagot közvetlenül a fecskendőből
- helyezzen egy másik kanült a fecskendőre
- Helyezze az anyagot az ínyre, anélkül, hogy a fogat érintené.
- Világítsa meg fotopolimerizációs lámpával.
- A fehérítés befejeztével távolítsa el.

Tárolás:

- ne tárolja magas hőmérsékleten és ne tegye ki közvetlen napfénynek
- használat után a kupakot azonnal helyezze vissza

Figyelmeztetések:

- Kizárólag fogászati célra használható.
- Lehetőleg fogorvos vagy fogszakorvos használja.
- Gyermekektől távol tartandó.
- Ha bőrirritáció vagy allergia jelentkezik, ne használja.
- Kerülje a bőrrel való érintkezését mielőtt az anyag megkötne. Ha az anyag bőrrel érintkezik, azonnal mossa le szappannal és vízzel.
- Ha véletlenül szembe kerül vagy hosszabb ideig érintkezik a nyálkahártyával, bő vízzel öblítse le.
- Használjon védőkesztyűt és lehetőleg kerülje a kézzel való érintést.
- Ha hűtőben tartja, használat előtt az anyag érje el a szobahőmérsékletet.

- Abban az esetben, ha az anyag nem kötne meg, ellenőrizze a lámpa fényerejét és lépjen kapcsolatba a gyártóval vagy eladóval.
- Ne használja a lejáratí időn túl.